

OZONAIR

優れた脱臭、除菌能力を通じて
公衆衛生ソリューションを提案



OZONE

高性能オゾンガス発生器

特許出願中



高性能オゾン除菌装置オゾネア




導入後の声

※医療機関、介護施設からのお声より抜粋。

- ・病院特有の臭いの脱臭効果がてきめん。オゾンの除菌効果が実感出来る。(兵庫県神戸市, 医療法人S)
- ・除菌効果が優れているので新型コロナ患者専用個室の除菌に活用している。(兵庫県西宮市, 医療法人M)
- ・発熱患者のための隔離個室での除菌に活躍している。(兵庫県西宮市, 医療法人誠豊会)
- ・操作方法は簡単。軽くて持ち運びやすいのでどこでも手軽に使える。(兵庫県神戸市, 医療法人Y)
- ・汚物室の臭いがなくなり、より衛生的になった。(兵庫県明石市, 社会福祉法人K)
- ・冬場の換気は利用者に負担をかけるが、オゾネアを使えばその負担が軽減する。(兵庫県神戸市, 株式会社S)
- ・衣類除菌設定は、ノロやインフルへの除菌に。職員が安心して働ける。(兵庫県神戸市, 社会福祉法人A)

商品説明

- 1 業界No.1の強いオゾン風。3.7m³/分(222m³/時)の大風量。1,000mg/hのオゾン発生量。吹上方式で、部屋の隅々までオゾンが行き渡る。オゾンの拡散と同時に分解も行うことで、短時間での除菌・脱臭を実現。

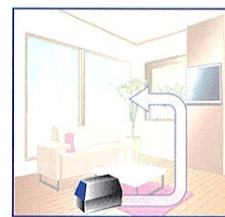

従来機：一方向に放出



上昇気流で一気に拡散

- 2 様々なニーズに応じた6種類のモードを搭載。

モード設定	ランプ状態	スタンバイ状態	総運転時間	備考
有人下モード 弱	●	5秒	連続	有人空間の除菌 20㎡以上
有人下モード 中	● ●	5秒	連続	有人空間の除菌 52㎡以上
有人下モード 強	● ● ●	5秒	連続	有人空間の除菌 84㎡以上
特殊モード 衣類除菌設定	●	60秒	連続	衣類の常時除菌が可能 専用ブースが必要
特殊モード 医療介護用 寝具除菌設定	● ●	60秒	180分	マットレスの除菌も可能 専用ブースが必要
特殊モード 強力除菌設定	● ● ●	30秒	120分	運転後120分で自動終了 無人空間の除菌専用

● : 点灯 ● : 点滅

- 3 当機器は放電方式ではなくランプ方式を採用することで、大気中に残る有害なNOx(窒素酸化物)がほとんど発生せず、錆を防ぐことができるため、本体にアルミニウムを採用し、軽量化を実現。

OZONAIR

「オゾネア」は、
除菌装置としては後発品。
だからこそ、
医療介護福祉に特化した開発設計。



商品特徴

✓ 最高水準のスピード除菌・スピード脱臭！

オゾン発生量最大1000mg/hで、最大風量3.7m³/分！
業界No.1「大風量+高性能」！ 短時間で除菌・脱臭が可能！

✓ 衣類やマットレスを、24h 365日いつでも除菌。

別売の専用ブース（衣類除菌用・医療介護寝具除菌用）を使って、白衣や介護エプロン等の衣類を常時除菌可能なモードや医療介護用マットレスの除菌を行う専用モードで除菌！

✓ 軽くて、コンパクト！ メンテナンスも手間いらず！

製品重量がたったの4kgほど！ 持ち運び楽々！

✓ 用途に合わせて、最適なモードを選ぶだけ！

用途別に、全6モードを搭載！ 有人下モードが3設定（弱・中・強）と、無人下モードが3設定（強力除菌設定・衣類除菌設定・療介護用寝具除菌設定）



(対象)
・放射線防護衣
・マットレス
・シーツ
・マスク
・カーテン
・白衣
・介護エプロン
など

▲専用ブースで除菌


使用例（一部抜粋）



▲病室の空間除菌（有人・無人）

15畳の病室・隔離個室

- ①患者の入院中
→有人下モード「中」
- ②患者の退院時
→強力除菌モード

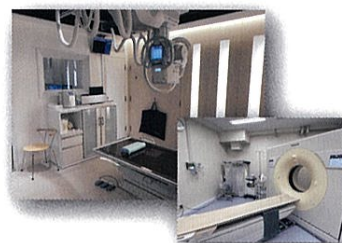

▲レントゲン室などの空間除菌（有人・無人）

30畳のレントゲン室

- ①人がいる場合
→有人下モード「強」
- ②無人の場合
→強力除菌モード



▲救急病棟の空間除菌（有人・無人）



▲発熱外来での空間除菌（有人・無人）

6畳の個室

- ①人がいる場合
→有人下モード「弱」
- ②無人の場合
→強力除菌モード



▲介護施設の共用エリアの空間除菌（有人）

30畳の共用エリア

- 人がいる場合
→有人下モード「強」


■ 主要仕様

製品名	高性能オゾン除菌脱臭装置
型式	NMOG-03085-L1
外形寸法	W250 × D250 × H324
重量	4.0kg
オゾン発生量	最大1,000mg/h (工場出荷時20℃の時)
オゾンガス原料	空気
風量	0.5~3.7m ³ /min
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
定格消費電力	60W
オゾン発生モード	低濃度(有人下モード): 強 / 中 / 弱 3段階 高濃度(無人下モード): 強力除菌設定
特殊モード	衣類除菌設定 / 医療介護用寝具除菌設定
付属品	電源コード, ドアタグ, ステッカー
保証期間	1年間
メンテナンス	活性炭フィルター(交換目安1年) オゾンランプ(交換目安約1,000時間)



▲ オゾネアの製品画像

■ 衣類除菌モードの使用時

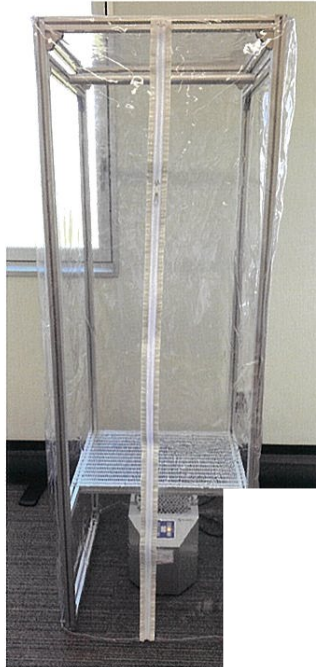

- 専用の衣類除菌ブースを用いて実施
- オゾンガスで常時除菌
- 衣類全般の除菌・脱臭が可能

■ 寝具除菌ブースの使用時



- 専用の寝具除菌ブースを用いて実施
- オゾンガスで180分かけて除菌
- 寝具全般の除菌・脱臭が可能
- 他にも洗にくい靴類などの除菌・脱臭にも活躍